




IDAL TIPS


VOOR VACCINATIE

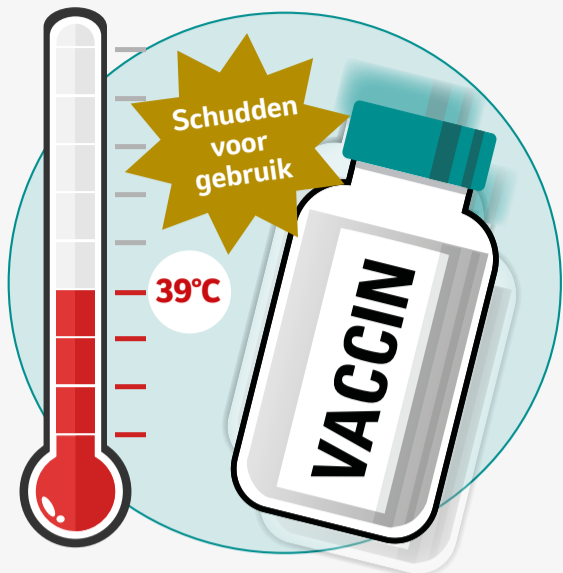

1 Warm het vaccin/oplosvloeistof (minimaal 5 minuten) op in handwarm water.



2 Spoel de IDAL minimaal 10 keer door. Wissel de flesjes regelmatig. Deze zijn gratis te bestellen bij uw dierenartsenpraktijk.

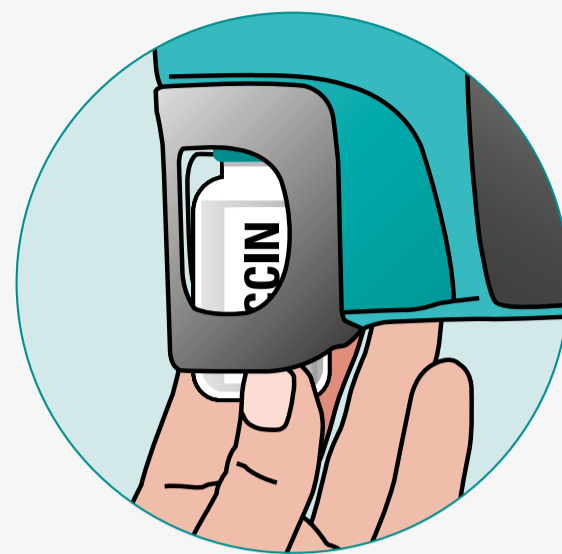


3 Plaats het vaccin in de IDAL. Houd de IDAL daarbij ondersteboven.

TIJDENS VACCINATIE



4 Reset de dagteller op de IDAL. Daarna is de IDAL klaar voor gebruik.

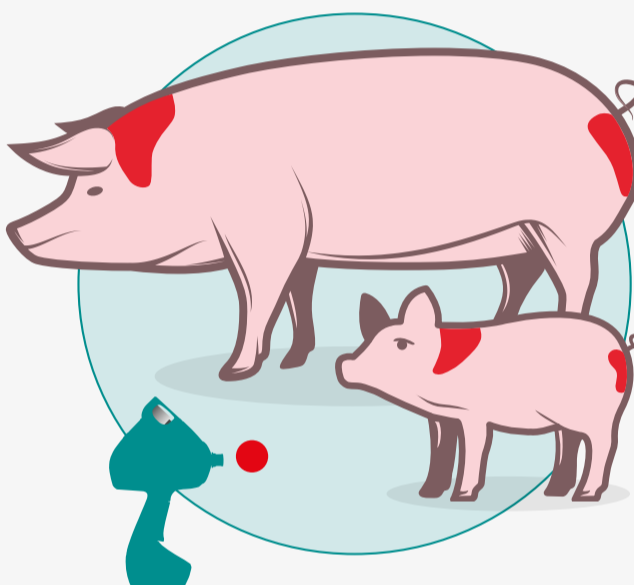

5 Dien het vaccin op de juiste plaats toe.




6 Vaccineer de hoeveelheid vaccin correct in de huid. Zorg voor voldoende contacttijd met de huid.

NA VACCINATIE



7 Spoel de IDAL na gebruik weer minimaal 10 keer door. Laat het flesje met spoelvloeistof op het toestel zitten.

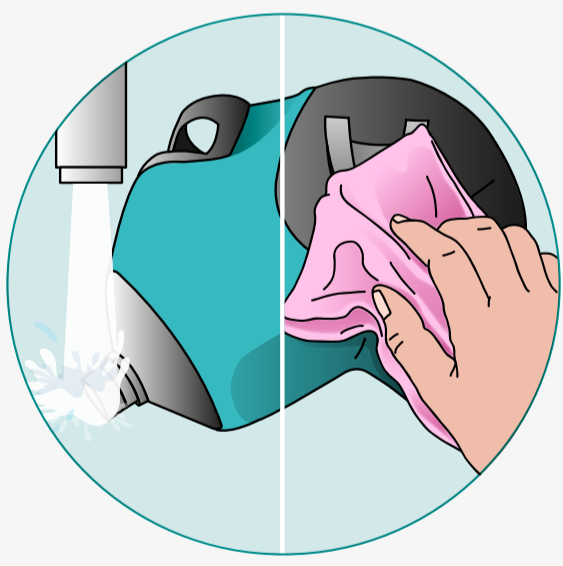

8 Maak de IDAL uitwendig schoon. Enkel de kop en de spike mogen onder de kraan. Let op: De behuizing van de IDAL is enkel spatwaterdicht.



9 Haal de accu uit de IDAL en berg de IDAL schoon op in de koffer. De IDAL is nu weer klaar voor de volgende keer.

OPLADEN VAN DE ACCU: MAXIMAAL 1,5 UUR



Scan de QR code voor toegang tot het IDAL gebruikersplatform.

TECHNISCHE VRAGEN?
STUUR EEN E-MAIL NAAR IDAL@MSD.COM
OF BEL +31 485 49 20 00

