




IDAL SFATURI


INAINTE DE VACCINARE

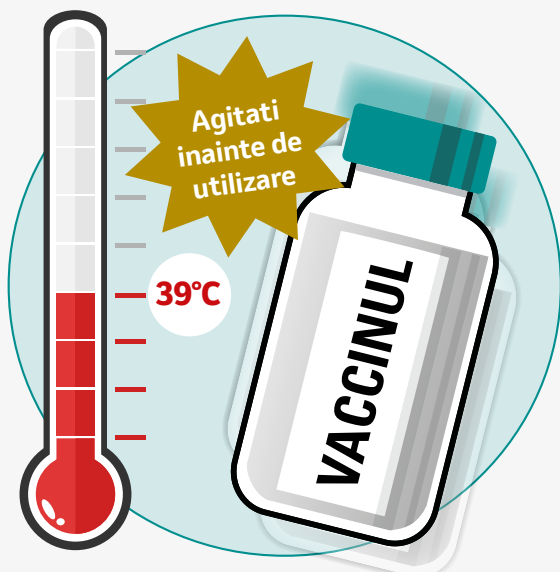

- 1 Incalziti vaccinul si solutul lichid (minimum 5 minute) in apa calduta.



- 2 Clatiti echipamentul IDAL pe interior de cel putin 10 ori. Schimbati flaconul periodic.

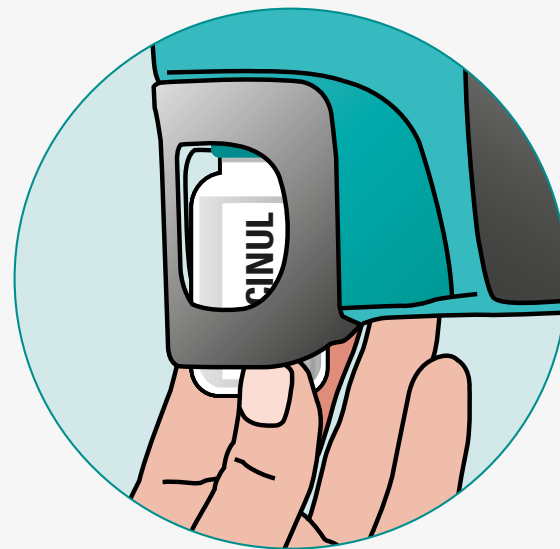


- 3 Plasati vaccinul in suportul IDAL. Cand faceti asta, tineti echipamentul IDAL cu capul de vaccinare in sus.

IN TIMPUL VACCINARII



- 4 Resetati contorul zilnic al IDAL. Echipamentul IDAL este acum gata de utilizare.

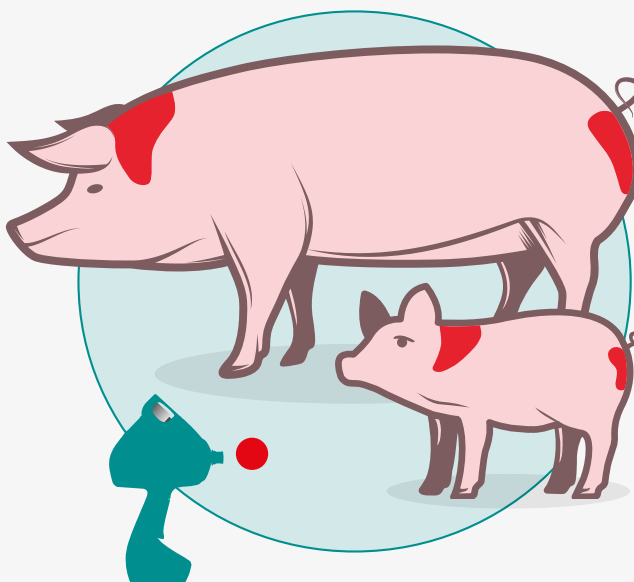

- 5 Aplicati vaccinul pe zona cutanata corecta.




- 6 Administrati volumul corect de vaccin in piele. Asigurati-va ca s-a efectuat un contact suficient cu pielea.

DUPA VACCINARE



- 7 Clatiti echipamentul IDAL din nou cel putin de 10 ori dupa utilizare. Lasă sticluta cu solutie de clătire pe aparat.

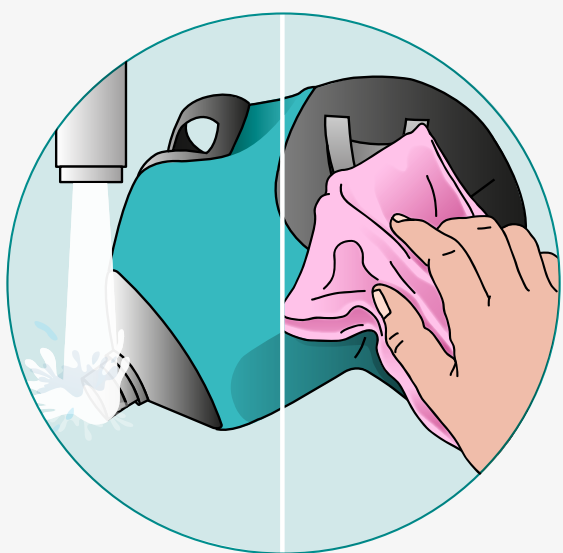

- 8 Curatati la exterior IDAL-ul. Capul injector si lancia din suport pot fi clatite sub jetul de apa la robinet. **Atentie!!!:** Carcasa echipamentului IDAL este rezistenta doar la stropire



- 9 Detasati bateria echipamentului IDAL si depozitati IDAL-ul curat in cutie. Echipamentul IDAL este acum gata pentru o noua utilizare.

INCARCAREA BATERIEI: MAXIM 1.5 ORE



Scanati codul QR pentru a accesa platforma utilizatorilor IDAL.

SUPPORT TEHNIC: +31 485 49 20 00

MSD
Animal Health